


SAAVA 250

NOSTIN

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

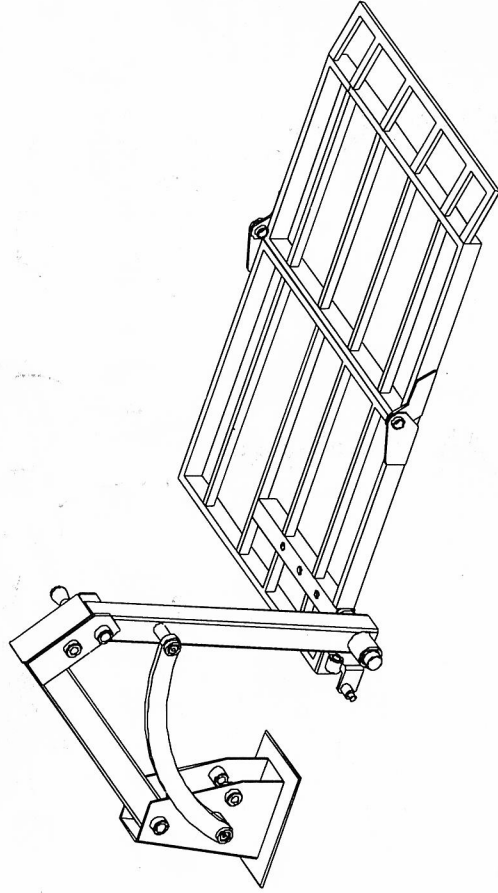

Saavalainen Oy
Lyyranpolku 1
01480 VANTAA
puh. (09) 872 9770

Sisällysluettelo

| | |
|---|-------|
| Tärkeää tietoa turvallisuudesta | 2 |
| Huolto, vikojen tunnistaminen ja romuttaminen | 3 |
| Nostimen varaosat ja sähkökaavio | 4 - 5 |
| Hydraulkoneikon varaosat | 6 |
| Moottorin hiihiharjojen vaihto | 7 |
| Aseennus autoon, mitat kuljetusasennossa | 8 |

Tärkeää tietoa turvallisuudesta.

Lue huolellisesti käyttöohje ohjeineen, neuvoineen ja varoitusteksteineen ennen nostimen käyttöönottoa.

NOSTIN ON TARKOITETTU AINOASTAAN PYÖRÄTUOLIJEN, INVAKÄRRYJEN JA TAVAROIDEN NOSTAMISEEN ajoneuvon pyörrien tasosta auton lattian tasolle. Nostimen käyttö muihin tarkoituksiin voi aiheuttaa vaaran ihmisille ja esineille.

ASENNUS- JA KORJAUSTYÖT on annettava valmistajan valtuuttaman huolto- liikkeen tehtäväksi.

NOSTINTA SAA KÄYTTÄÄ vain sen käyttöön perehtynyt henkilö, lapset eivät saa leikkiä nostimella eivätkä koskea sen ohjauslaitteisiin.

ÄLÄ TEE MUUTOKSIA nostimeen, se voi aiheuttaa vahinkoa.

ÄLÄ NOSTA AUTOA laskemalla nostotaso maahan ja jatkamalla tason ajoa alaspäin.

ÄLÄ jätä ohjausyksikköä ja -kaapelia auton ulkopuolelle tai oven yms. väliin. KATKAISE JÄNNITE nostimestä käytön jälkeen.

ÄLÄ NOSTA YLI 300 kg KUORMAA.

PYÖRÄTUOLIN JARRUN tulee olla kytkettynä NOSTON aikana.

ÄLÄ NOSTA nostotaso kuormittuna YLI auton lattiatason.

VAARA: NOSTOTASO ALKAA KÄÄNTYÄ KULJETUSASENTOON.

HUOLEHDI nostolavalle esteetön LIIKKUMATILA.

ÄLÄ käytä nostinta kun auto on KALLELLAAN tai JYRKÄSSÄ YLÄ- TAI ALAMÄESSÄ. VAARA: Pyörätuoli voi kaatua tai liukua pois nostolavalta.

MIKÄÄN osa kuormasta EI SAA NOSTON AIKANA olla nostolavan ULKOPUOLELLA. VAARA: Puristusvaara nostotason ja auton välissä.

KÄYTTÖOHJEEN tulee kulkea nostimen mukana niin että nostimen käyttäjä voi tutustua ohjeeseen!